

INSTRUCCIONES ERA – EMMA – ALICE – ENDOMETRIO

El estudio de EndomeTRIO (o alguno de sus test: ERA – EMMA – ALICE) debe de ser prescrito siempre por un especialista médico.



Paso 1: Contacte con nosotros

Llame al **11 2000-3107 / 11 5984-2420** o contacte con nosotros por email a infoargentina@igenomix.com

- Pida más información del test ERA – EMMA – ALICE.
- Solicite el envío de kits.
- Si es la primera vez que se solicita un test ERA – EMMA – ALICE, enviaremos al médico las instrucciones oportunas de cómo proceder, así como el manual EndomeTRIO.



Paso 2: Recepción del Kit

Revise el contenido del Kit y asegúrese de que contiene:

- Criotubo con 1.5ml con solución transparente en su interior.
- Envase secundario de plástico (envase de seguridad del tubo).



Paso 3: Toma de la muestra

Notas importantes:

- Tras leer detalladamente el manual EndomeTRIO, el médico debe determinar el tipo de ciclo, protocolo y fecha de biopsia. La documentación puede descargarse en el siguiente link: <https://endometrial.igenomix.com/>
- Los siguientes casos pueden suponer la no aceptación de la muestra por parte de nuestro laboratorio:
 - Las muestras que no vayan acompañadas de la documentación (Formulario Solicitud y el Consentimiento Informado).
 - La documentación (Formulario Solicitud y el Consentimiento Informado) que no se ha completado correctamente.
 - Los campos obligatorios, identificados en los formularios con un asterisco (*), que no se encuentren completados.
 - La ausencia de la firma del paciente y/o la firma y sello del médico solicitante en el formulario de solicitud y consentimiento informado.

Toma de muestra:

- **Una única biopsia endometrial** es necesaria, tanto para realizar solo uno de los test, como para realizar un EndomeTRIO (resultado para ERA, EMMA y ALICE).
- Tamaño de la muestra: La cantidad de tejido a introducir en el criotubo (suministrado por Igenomix), **no deberá exceder la línea blanca marcada** en el mismo. Las muestras con volumen distinto al indicado serán evaluadas para asegurar que la cantidad no haya afectado a la calidad de la misma. En caso de que así sea, se solicitará otra muestra.
- La biopsia endometrial se tomará según las indicaciones que se describen en el manual de EndomeTRIO (visite nuestra página web para información adicional).
- Etiquete el tubo con los siguientes datos identificativos (opción 1 u opción 2):
 - Fecha de biopsia, iniciales de la paciente o nombre completo y fecha de nacimiento
 - Fecha de biopsia, iniciales de la paciente o nombre completo y número de historia clínica

Un etiquetado incorrecto del tubo puede suponer la no aceptación de la muestra por parte de nuestro laboratorio.

Después de la toma de muestra:

- Tras la extracción, el criotubo con la muestra deberá agitarse durante unos segundos.
- El criotubo con la biopsia endometrial en su interior deberá colocarse en **heladera** (entre 4 y 8°C) **INMEDIATAMENTE** después de la toma de la biopsia y durante **al menos 4 horas**. Tras este tiempo, las muestras podrán ser enviadas a Igenomix a temperatura ambiente.
- ERA: Si el envío de muestra/s no se realiza inmediatamente a Igenomix después de las 4 horas (en las que la muestra debe estar refrigerada a 4-8°C), las muestras podrán mantenerse **en heladera hasta 3 semanas** o ser congeladas a -20°C.
- EMMA y ALICE: Se recomienda no almacenar las muestras y procesarlas lo antes posible después de ser recogidas, ya que el microbioma puede fluctuar con el tiempo. No es recomendable dejar pasar más de 1 semana antes de enviarla.
- Coloque el criotubo en el interior del envase secundario de plástico y ciérrelo. Introduzca el envase secundario de plástico dentro del Kit e introdúzcalo dentro de la caja correspondiente para su envío junto con la documentación completada y firmada. En caso que la caja de Igenomix no coincida con el tamaño proporcionado por la empresa de transporte, el tubo con la muestra dentro del receptáculo puede colocarse en un sobre.

INSTRUCCIONES ERA – EMMA – ALICE – ENDOMETRIO

**Paso 4:**
Transporte de la muestra

- Las muestras pueden enviarse a temperatura ambiente.
- Se recomienda utilizar el Kit o caja proporcionado por Igenomix para el retorno de la muestra.
- Los envíos a temperatura ambiente no deberán exceder los 5 días de duración para asegurar la acción preservativa del líquido del criotubo. Cuando se superen los 35°C, se recomienda añadir un acumulador de frío al paquete. En caso de dudas, por favor, contacte con nuestro departamento de Atención al Usuario.

**Paso 5:**
Recogida de la muestra

Las guías de transporte se deben solicitar por email a infoargentina@igenomix.com.

Para que la estabilidad de la muestra no se vea comprometida, se recomienda realizar las recogidas en los siguientes intervalos:

Recogidas en Argentina: Lunes a Miércoles.

Para coordinar la recogida de muestras, enviar de manera anticipada (mínimo de 72 hs) el consentimiento firmado de la paciente. Con este documento se inicia el trámite para obtener el permiso de transporte, de acuerdo a las normativas del Ministerio de Salud, y posterior programación de la guía.

Enviar el formulario y consentimiento original firmado junto con la muestra y una copia de estos por email a infoargentina@igenomix.com.

Festivos: Los días anteriormente indicados pueden verse modificados por festivos. En dichos casos se le comunicaría previamente a la recogida los días disponibles desde nuestro departamento de atención al cliente.

Se recomienda realizar el envío de muestras, a la mayor brevedad posible, con el fin de garantizar la calidad de la muestra.

**Paso 6:**
Resultados del test

Igenomix enviará los resultados del test a su médico en 15 días desde la recepción de la muestra en el laboratorio.

El resultado del test ERA incluye una recomendación para la realización de la transferencia embrionaria personalizada. El informe de EMMA y ALICE incluye una terapia sugerida en caso de ser necesaria. En algunos casos, una nueva biopsia podría ser solicitada (para ERA, EMMA, ALICE o EndomeTRIO). En este caso, su médico le indicará cómo proceder.

**Información adicional**

Para la recogida de la muestra o información adicional:



11-2000-3107 / 11-5984-2420



infoargentina@igenomix.com